

Praxis und Labor

Prof. Dr. med. Christian Meier
 Prof. Dr. med. Marius Kraenzlin
 Frau Dr. med. Claude Kraenzlin
 Frau Dr. med. Martina Bally
 Prof. Dr. med. Ulrich Keller

Fracture Liaison Service USB

Prof. Dr. med. Norbert Suhm

Bone Research Unit

Osteologisches Universitäts-
 forschungszentrum DVO

ENTNAHME-BEDINGUNGEN:

Die Entnahme von Blut und Urin für die Calcium- und Knochenstoffwechsel-
 untersuchung sollte am morgen nüchtern vor 1000h erfolgen

PARAMETER	ART des MATERIALS und VERARBEITUNG	TRANSPORT
Calcium	Serum, nach 1-2 Std. zentrifugieren	ohne spez. Massnahmen Versand mit A-Post
Magnesium	Serum, nach 1-2 Std. zentrifugieren	ohne spez. Massnahmen Versand mit A-Post
Phosphor	Serum, nach 1-2 Std. zentrifugieren	ohne spez. Massnahmen Versand mit A-Post
Kreatinin	Serum, nach 1-2 Std. zentrifugieren	ohne spez. Massnahmen Versand mit A-Post
Alk.Phosphatase (Total & Knochen-Isoenzym)	Serum, nach 1-2 Std. zentrifugieren	ohne spez. Massnahmen Versand mit A-Post
Osteocalcin	Serum, nach 1-2 Std. zentrifugieren	Transport ins Labor innert 24 Stunden mit A-Post
Procollagen Typ I (PINP)	Serum, nach 1-2 Std. zentrifugieren	Transport ins Labor innert 24 Stunden mit A-Post
β -Crosslaps (CTx) Serum (c-terminales Telo peptide)	Serum, nach 1-2 Std. zentrifugieren	Transport ins Labor innert 24 Stunden mit A-Post
Parathormon (intakt)	Serum, nach 30 Minuten zentrifugieren sofort tieffrieren <i>oder</i> EDTA Plasma, zentrifugieren	Transport tiefgefroren (spez. Behälter sind bei uns erhältlich) Transport ins Labor innert 24 Stunden mit A-Post
25-OH Vitamin D	Serum, nach 1-2 Std. zentrifugieren	Transport ins Labor innert 24 Stunden mit A-Post
1,25-(OH) ₂ Vitamin D	Serum, nach 1-2 Std. zentrifugieren	Transport ins Labor innert 24 Stunden mit A-Post
Calcitonin	Serum, nach 1-2 Std. zentrifugieren sofort tieffrieren	Transport tiefgefroren (spez. Behälter sind bei uns erhältlich)
Pyridinolin	Urinsammlung am Morgen nüchtern über 2 Std. Urin (8-10 ml), vor UV- Lichteinfluss schützen	ohne spez. Massnahmen Transport in Plastikröhrchen A-Post

ABHOLDIENST in Basel Stadt:

Der Abholdienst kann jeweils am **Montag, Mittwoch** und **Freitag** bis um **12.00 Uhr** bei **Herrn Prof. J. Girard**, Hirzbodenweg 48, 4052 Basel, **Tel. 312 27 00**, angefordert werden. Wir bitten Sie dabei anzugeben, ob der Transport tiefgefroren erfolgen soll.

Endonet AG
 Missionsstrasse 24
 CH-4055 Basel
 T 061 264 97 97
 F 061 264 97 96
 info@endonet.ch
www.endonet.ch

